

FAQ breathe ilo

Generell

Was ist breathe ilo?
Ein Fruchtbarkeitstracker

Was macht das Produkt?
breathe ilo kann dir täglich deinen Fruchtbarkeitsstatus ermitteln. Durch die CO2 Messung und deine Eingaben in den Zykluskalender, kann dir breathe ilo helfen deinen Körper und Zyklus besser zu verstehen.

Wer hat es erfunden?
Die Founder von breathe ilo sind der angesehene Gynäkologe und Endokrinologe Prof. DDr. Ludwig Wildt und der Medizintechniker Dr. Horst Rüther.

Wozu verwendet man es?
Zur natürlichen Zykluskontrolle und zum Kinderwunsch. breathe ilo ist der einfachste Weg die fruchtbaren Tage der Frau zu bestimmen. Die Frau atmet 1 Minute in das Gerät und das Resultat wird ihr in einer Smartphone App angezeigt.

Wieviel kostet es?
€ 289

Wo kann man es kaufen?
In unserem Online Shop www.shop.breathelo.com

Was bekommt man, wenn man es bestellt?
Bei der Bestellung von breathe ilo ist das Atemluftanalysegerät, ein Ladegerät, eine Nasenklammer, ein Mundstück, eine Bedienungsanleitung und die benutzerfreundliche App enthalten.

Produkt

Was für Features sind verfügbar?
breathe ilo: Atemanalysegerät und die Smartphone App

In welchen Farben gibt es das Produkt?
Weiß mit einem himbeerroten Ring

Welche Größen gibt es?
Es gibt nur eine Größe von breathe ilo

Ist es komfortabel?
Es ist die komfortabelste Methode, um die fruchtbaren Tage der Frau zu bestimmen

Technologie

Was ist das Besondere an der Technologie?

breathe ilo ist der weltweit erste Fruchtbarkeitstracker, der die fertilen Tage der Frau über eine CO2 Messung identifizieren kann.

Wird es mit einem Akku betrieben? Wielange hält dieser im Durchschnitt?
USB-C, ca. 1x im Monat

Wie groß und schwer ist das Gerät?
4.3 x 2.5 x 1.1 (h/w/t), 90g

Wie funktioniert es?

Man muss nur 1 Minute täglich in das Gerät atmen und schon bekommt man die Ergebnisse in der Smartphone App angezeigt.

Welcher Sensor wird benutzt?
CO2 Sensoren

Wird es in der Zukunft updates dazu geben?
Es wird Updates für die Smartphone App mit neuen Features geben.

Wie kommuniziert das Gerät mit anderen?
Über Bluetooth

Ist es wasserfest?
Das Gerät ist spritzwasserfest. Das Mundstück ist Geschirrspülfest

Wo wird es produziert?
breathe ilo wurde in Österreich entwickelt und produziert

Wielange dauert eine Messung?
1 Minute täglich

App

Gibt es eine App dazu? Welche Mobiltelefone werden unterstützt?
breathe ilo funktioniert mit einer Smartphone App für Android (ab Version 6) und iOS (ab Version 11)

Ab wann ist die App verfügbar?
Die App wird ab dem Zeitpunkt der Auslieferung des Gerätes in den Stores verfügbar sein

Wie kommuniziert das Gerät mit der App?
Über Bluetooth

Was kann man von der App erwarten?

Die App ist mit dem Gerät verknüpft und zeigt den Zyklus Kalender sowie die fruchtbaren Tage an. Es ist auch möglich verschiedene Symptome zu dokumentieren.

Wird es Updates zur App geben?

Es werden immer wieder Updates von der App gemacht. Diese werden neue Features beinhalten.

Einrichtung

Wie nehme ich das Gerät in Betrieb?

Das Gerät wird mit der App und dem Benutzer bei der ersten Registrierung verknüpft. Eine genaue Anleitung dazu findet ihr in der Betriebsanleitung.

Wie schalte ich es ein und aus?

Es gibt einen Ein- und Ausschaltknopf am Gerät

Wie verwende ich das Gerät?

Man steuert das Gerät über die App

Wie kann man breathe ilo säubern?

Das Gerät kann mit einem Feuchttuch gereinigt werden.

Kann man es in den Geschirrspüler geben?

Ja, das Mundstück kann im Geschirrspüler gewaschen werden.

Hat es ein Ablaufdatum?

Nein

Technische Probleme

Was mache ich wenn die App abstürzt?

Bitte noch einmal aus und einschalten.

Was, wenn die App nicht mit dem Gerät verbindet?

Bitte überprüfe deine Mobilfunkdaten und deine Bluetooth Verbindung

Das Gerät reagiert nicht?

Bitte überprüfe, ob du das Gerät aufgeladen hast.

Benützung

Was ist das empfohlene Alter?

Alle Frauen zwischen 20 und 45 Jahren, die ihren Zyklus tracken und/oder einen Kinderwunsch haben.

Wer kann es benutzen?

breathe ilo kann von überall aus genutzt werden.

Ist es sicher?

Ja

Welche Zertifikate hat das Gerät?

CE und FC Zertifiziert

Wie wird meine Privatsphäre sichergestellt?

Die Daten werden mit größter Sorgfalt und anonymisiert behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Wie sicher ist das Gerät?

Das Gerät trifft alle Standard und Datensicherheits- Anforderungen.

Kann mich jemand beobachten oder mich hören?

Nein

Gibt es Risiken bei der Benützung des Produktes?

Nein

Wie genau ist das Produkt?

breathe ilo erkennt im Durchschnitt 5 von 6 fruchtbaren Tagen

Gibt es eine Einschränkung des Zyklus um das Gerät zu benutzen?

breathe ilo ist von Frauen mit Zyklen zwischen 24 und 35 Tagen getestet und zugelassen. Bei Zyklen außerhalb dieses Bereiches, kann die Genauigkeit nicht garantiert werden.

Kann ich es zur Verhütung verwenden?

breathe ilo ist nicht für die Verhütung zugelassen.

Können auch Frauen mit PCOS breathe ilo verwenden?

breathe ilo ist derzeit nicht für Frauen mit PCOS getestet.

Funktioniert breathe ilo auch bei Asthma oder andere Lungenerkrankungen?
Leider kann breathe ilo von Frauen mit Lungenkrankheiten (wie zB Asthma oder COPD) nicht angewendet werden.

Was passiert wenn ein Tag vergessen wird?
breathe ilo ist nur bei täglicher Anwendung genau. Es darf maximal ein Tag ausgelassen werden.

Was für eine Erfolgsquote hat breathe ilo?
Es gibt bei keiner, am Markt existierenden Methode, die Garantie schwanger zu werden. Dennoch zeigen Studien, dass sich die Wahrscheinlichkeit verdoppelt, wenn man seinen Zyklus trackt.

Gibt es Studien zum Produkt?
Wir planen unsere klinische Studie in 2019 zu publizieren.

Gibt es Studien, die die Methode belegen?
Es gibt einige publizierte Studien, die zeigen, dass der CO2 Partialdruck einen Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus hat.
Hier sind drei Beispiele:

- 1) The biphasic pattern of end-expiratory carbon dioxide pressure:
[https://www.fertstert.org/article/S0015-0282\(07\)01432-X/fulltext](https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(07)01432-X/fulltext)
- 2) Phasic menstrual cycle effects on the control of breathing in healthy women: <https://europepmc.org/abstract/med/16542884>
- 3) Journal for Fertility and Reproduction (only in German available):
<https://www.kup.at/kup/pdf/1369.pdf>

Versand

Wohin kann es geliefert werden?
Europäische Union

Wie hoch sind die Versandkosten?
Der Versand ist inkludiert.

Ich bin interessiert am Vertrieb von breathe ilo. An wen kann ich mich wenden?
Bitte senden Sie ein E-Mail an contact@breatheilo.com

Muss ich Steuern bezahlen?
Ja

Garantie und Rückgabe

Gibt es eine Garantie?

Es gibt eine Standard Gewährleistung des Produktes. Diese richtet sich nach dem jeweiligen Empfängerland.

Wie ist das Rückgaberecht

Die Rückgabe wird von Fall zu Fall individuell angeschaut.

Was sind die Rückgaberichtlinien.

Es gibt keine Rückerstattung.

Wie kann ich den Status meiner Bestellung erfahren?

Wir werden Updates bzgl der Produktion und Fertigstellung auf unserer Website veröffentlichen.

Ich habe andere Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Presse: press@breatheilo.com

Investment Anfragen: contact@breatheilo.com

Unterstützung und Hilfe: support@breatheilo.com